


## GoTalk 20+ Kommunikator

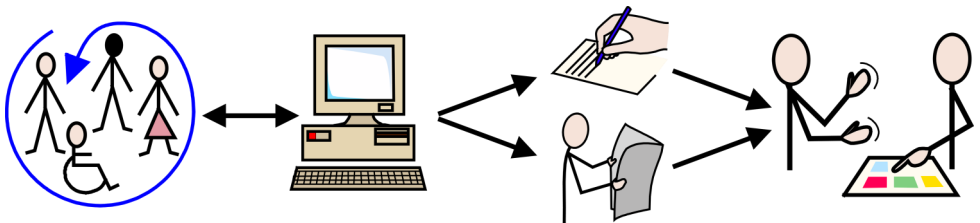

[www.normedia.no](http://www.normedia.no)

## Nivå-innstillinger

Trykk og slipp nivåknappen for å endre nivå. Den nivåindikatoren som lyser viser hvilket nivå du er på.

For å slette innholdet på et nivå, trykk og slipp opptaksknappen (Record) på baksiden av enheten. Trykk på nivå-knappen for å skifte til det nivået du vil slette. Trykk på "Erase" knappen på baksiden av talemaskinen. Bruk en spiss gjenstand, penn.e.l. (NB! Hele nivået slettes).

Man kan ikke slette kjernevokabularet (den øverste raden). Endring av disse feltene gjøres ved å lese over.

## Innlesing av meldinger

- Slå på GoTalk med av/på bryteren på baksiden.
- Velg nivå ved hjelp av nivåknappen.
- Trykk på opptaksknappen og slipp den. Den grønne nivålampe vil lyse.
- Trykk på et felt og slipp.
- Les inn. Den røde opptaksindikatoren vil lyse under hele opptaket.
- For å avslutte innlesing, trykk på hvilket som helst felt.
- For å høre den innleste meldingen, trykk på feltet hvor meldingen er lest inn.
- Hvis du ikke er fornøyd. Les inn på nytt.

Du kan ha 10 sekunders opptak på nivå 1-4 og 20 sekunder på nivå 5. De to "hovedknappene" for grunnvokabular kan ha 17 sekunder. Disse er uten nivå og vil være det samme for alle nivåer, slik at noen gjentatte fraser som f.eks. "Ja", "nei", "hei", "takk", og "vær så snill" kan være enkelt tilgjengelig uansett nivå.

## Overlegg

Overlegg kan lages enten i GoTalk overleggsprogram eller i InPrint.

GoTalk programmet inneholder ca.1000 bilder og illustrasjoner.

InPrint inneholder ca. 15.000 WLS (Widgit Lese- og skrivesymboler).  
(Les mer om InPrint på [www.symboler.no](http://www.symboler.no) og [www.normedia.no](http://www.normedia.no))

Begge programmer kan kjøpes løst, eller som en pakkeløsning med produktet.

## Tekniske spesifikasjoner

Størrelse: 23 (B) x 30 (H) x 3 (D) cm

Vekt: 340 gram

Batterier:

2 AA batterier følger med.

Skiftes på baksiden. Deksel åpnes med stjernetrekker.

